

Orthopädie - Technik

Reha-Technik

Sanitätsfachhandel

Miederwaren

Homecare

Ernst-Thälmann-Str. 3

09366 Stollberg

Tel: 03 72 96 – 92 79 70

Fax: 03 72 96 – 92 79 79

- Gebrauchsanweisung -

Sonderanfertigung

- Orthese -

Sehr geehrte Anwender,

Diese Information ergänzt die Ihnen von unseren Mitarbeitern bei Erhalt Ihres Hilfsmittels detailliert gegebenen Gebrauchshinweise.

Ihre Beinorthese wurde zur Korrektur bzw. Linderung oder Kompensation Ihrer Orthopädischen oder Neurologischen Beschwerden speziell für Sie von unseren Mitarbeitern sorgfältig gefertigt und vor der Abgabe eingehend geprüft.

Sollten dennoch einmal Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an ihren Ansprechpartner bei uns im Haus.

Gebrauchshinweise

Behandeln Sie ihre Orthese bitte sorgfältig.

Prüfen Sie die Orthese vor jeder Verwendung auf einwandfreien Zustand und ordnungsgemäße Funktion.

Bei ggf. vorhandenen justierbaren Gelenkansschlägen ist vor jeder Verwendung die korrekte Funktion der Gelenkansschläge zu prüfen.

Achten Sie beim Anziehen der Orthese auf deren richtige räumliche Ausrichtung zum Körper.

Vermeiden Sie beim Anziehen Falten und Quetschungen von Haut oder sonstigem Gewebe.

Schließen Sie die Verschlüsse in der vorgegebenen Reihenfolge gleichmäßig und nicht zu fest.

Prüfen Sie direkt nach dem Anziehen der Orthese deren festen und sicheren Sitz.

Kontrollieren Sie die Lage der Gelenkdrehpunkte und ggf. den korrekten Sitz einer Tuberabstützung.

Schützen Sie die Orthese gegen zu hohe Temperaturen (z.B. Sonne, Heizung), Schlageinwirkung und direkte Wassereinwirkung (z.B. Sauna, Bad, Wassersport)

Nur für ausdrückliche Badeorthesen ist direkter Wasserkontakt zulässig.

Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Haut. Achten Sie dabei besonders auf Druckstellen und Hautverfärbungen (Gefahr von Haut- und Gewebeschädigungen).

Führen Sie möglichst täglich die Hautpflege bzw. Hauthygiene und ggf. Hautmassage durch.

Reinigen und pflegen Sie innenliegende, mit Haut in Kontakt kommende Teile der Beinorthese regelmäßig mit geeigneten Reinigungsmitteln nach Angabe unserer Mitarbeiter.

Verwenden Sie keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel!

Erstellt: 17.02.2020

17.02.2020

FB:

9.0.0.2

Von: T. Strube

Von:

Von:

Geprüft: 17.02.2020

Inkraftsetzung: 17.02.2020

Von: I. Ludwig

Von:

Freigabe:

Wenn ihre Orthese über elektronische Bauteile verfügt, befolgen Sie bitte unbedingt die Verwendungsanweisungen, die unsere Mitarbeiter Ihnen gegeben haben und lesen Sie die Ihnen ausgehändigte Patienteninformation aufmerksam durch. Verwenden Sie bitte nur die mitgelieferten Akkueinheiten und die dazugehörigen Ladekabel/Vorrichtungen. Laden Sie die Akkueinheiten immer vollständig auf und lassen Sie niemals Tiefenentladen.

Wichtige Hinweise

Bei Schäden bzw. Fehlfunktionen an Ihrer Beinorthese verwenden Sie die Orthese auf keinen Fall ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem zuständigen Techniker!
Bei Schwellungen bzw. Ödembildung wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Arzt oder Ihren für Sie zuständigen Techniker.
Führen Sie an der Beinorthese auf keinen Fall Änderungen bzw. Reparaturen in Eigenregie durch!

Gewährleistung

Eine Gewährleistung tritt nur in Kraft, wenn das Produkt unter den vorgeschriebenen Bedingungen und zu dem vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt wird. Die Gewährleistung und die Garantie erlöschen, wenn das Produkt anders eingesetzt wird oder mit anderen Bauteilen oder Materialien kombiniert wird. Da uns eine Kontrolle der Einhaltung der Handhabungen und des Umgangs mit den Akkus nicht möglich ist, können wir dahingehend keinerlei Haftung für durch Akkus entstandene Schäden oder Kosten gewähren. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäfts-, Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Erstellt: 17.02.2020
17.02.2020
FB:
9.0.0.2
Von: T. Strube
Von:
Von:

Geprüft: 17.02.2020
Inkraftsetzung: 17.02.2020

Von: I. Ludwig
Von:

Freigabe: