

Orthopädie - Technik

Reha - Technik

Sanitätsfachhandel

Miederwaren

Homecare

Ernst-Thälmann-Str. 3

09366 Stollberg

Tel: 03 72 96 – 92 79 70

Fax: 03 72 96 – 92 79 79

- Gebrauchsanweisung -

Sonderanfertigung

- Oberschenkelprothese -

Sehr geehrter Anwender,

Diese Information ergänzt die Ihnen von unseren Mitarbeitern bei Erhalt Ihres Hilfsmittels detailliert gegebenen Gebrauchshinweise.

Beachten Sie unbedingt alle erhaltenen Hinweise!

Ihre Unterschenkelkurzprothese wurde als funktioneller Körperteilersatz speziell für Sie von unseren Mitarbeitern sorgfältig gefertigt und vor Abgabe eingehend geprüft.

Behandeln Sie die Prothese bitte sorgfältig.

Sollten dennoch einmal Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an ihren Ansprechpartner bei uns im Haus.

Gebrauchshinweise

Prüfen Sie die Prothese vor jeder Verwendung auf einwandfreien Zustand und ordnungsgemäße Funktion.

Ziehen Sie bitte alle mit ihrem Prothesenschaft verbundenen Komponenten (z.B. Liner, Stumpfstrümpfe, Weichwandinnenschäfte, etc.) in der richtigen Reihenfolge an. Anschließend ziehen Sie den Prothesenhartschaft an und achten auf deren richtige Ausrichtung der gesamten Prothese.

Kontrollieren Sie anschließend die Funktion ihres verbauten Haftsystems (z.B. Pin, Kordel, BOA-System, Ventil, etc.) und legen, wenn vorhanden, die dazugehörige Hüftbefestigungsbandage an.

Vermeiden Sie beim Anziehen Falten und Quetschungen von Haut oder sonstigem Gewebe.

Prüfen Sie direkt nach dem Anziehen der Prothese deren festen und sicheren Sitz.

Achten Sie bei Innenlinern auf die richtige Position des Verschlussstiftes; kontrollieren Sie, ob der Verschlussstift sicher und richtig eingerastet ist.

Verwenden Sie die Prothese nur mit Schuhen richtiger Absatzhöhe. Lassen Sie Ihre Schuhe ggf. von dem für Sie zuständigen Mitarbeiter auf Eignung prüfen.

Schützen Sie die Prothese gegen zu hohe Temperaturen (z.B. Sonne, Heizung), Schlägeinwirkung und direkte Wassereinwirkung (z.B. Sauna, Bad, Wassersport)

Nur für ausdrückliche Badeprothesen ist direkter Wasserkontakt zulässig.

Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Haut des Strumpfes. Achten Sie dabei besonders auf Druckstellen und Hautverfärbungen (Gefahr von Haut- und Gewebeschädigungen).

Als Vorbereitung und zur Abhärtung der Haut empfehlen wir, empfindliche Haut regelmäßig mit Franzbranntwein einzureiben.

Führen Sie möglichst täglich die Stumpfhygiene und ggf. die Stumpfmassage durch.

Reinigen und pflegen Sie den Innenschaft bzw. den Innenliner regelmäßig mit geeigneten

Reinigungsmitteln nach Angabe unserer Mitarbeiter.

Erstellt: 17.02.2020

Geprüft: 17.02.2020

Freigabe:

17.02.2020

Inkraftsetzung: 17.02.2020

FB:

9.0.0.4

Von: T. Strube

Von: I. Ludwig

Von:

Von:

Von:

Verwenden Sie keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel!

Lassen Sie den Innenschaft bzw. Innenliner regelmäßig über Nacht ablüften. Trocknen Sie ggf. den Innenschaft/ Innenliner bei Durchfeuchtung langsam und nicht auf Heizung bzw. Ofen oder in der Sonne.

Wenn ihre Prothese Über elektronische Bauteile verfügt befolgen sie bitte unbedingt die Verwendungsanweisungen, die unsere Mitarbeiter ihnen gegeben haben und lesen sich die ihnen ausgehändigte Patienteninformation aufmerksam durch.

Verwenden sie bitte nur die mitgelieferten Akkueinheiten und die dazugehörigen Ladekabel/ Vorrichtungen. Laden sie die Akkueinheiten immer vollständig auf und lassen sie niemals Tiefenentladen.

Wichtige Hinweise

Bei Schäden bzw. Fehlfunktionen an ihrer Prothese verwenden Sie die Prothese auf keinen Fall ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Ihrem zuständigen Techniker!

Führen Sie an der Prothese auf keinen Fall Änderungen bzw. Reparaturen in Eigenregie durch!

Gewährleistung

Eine Gewährleistung tritt nur in Kraft, wenn das Produkt unter den vorgeschriebenen Bedingungen und zu dem vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt wird. Die Gewährleistung und die Garantie erlöschen, wenn das Produkt anders eingesetzt wird oder mit anderen Bauteilen oder Materialien kombiniert wird. Da uns eine Kontrolle der Einhaltung der Handhabungen und des Umgangs mit den Akkus nicht möglich ist, können wir dahingehend keinerlei Haftung für durch Akkus entstandene Schäden oder Kosten gewähren. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäfts-, Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Erstellt: 17.02.2020

17.02.2020

FB:

9.0.0.4

Von: T. Strube

Von:

Von:

Geprüft: 17.02.2020

Inkraftsetzung: 17.02.2020

Von: I. Ludwig

Von:

Freigabe: