

Orthopädie - Technik

Reha - Technik

Sanitätsfachhandel

Miederwaren

Homecare

Ernst-Thälmann-Str. 3

09366 Stollberg

Tel: 03 72 96 – 92 79 70

Fax: 03 72 96 – 92 79 79

- Gebrauchsanweisung -  
Sonderanfertigung  
- Orthopädische Hilfsmittel -

Sehr geehrter Anwender,

Diese Information ergänzt die Ihnen von unseren Mitarbeitern bei Erhalt Ihres Hilfsmittels detailliert gegebenen Gebrauchshinweise.

Beachten Sie unbedingt alle erhaltenen Hinweise!

Ihr orthopädisches Hilfsmittel wurde als funktioneller Körperersatz bzw. zur Korrektur von Fehlstellungen oder Unterstützung/ Kompensation von Körperfunktionen speziell für Sie von unseren Mitarbeitern sorgfältig gefertigt und/oder angepasst sowie vor Abgabe eingehend geprüft.

Behandeln Sie ihr Hilfsmittel bitte sorgfältig.

Sollten dennoch einmal Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an ihren Ansprechpartner bei uns im Haus.

Gebrauchshinweise

Behandeln Sie Ihr Hilfsmittel bitte sorgfältig.

Prüfen Sie das Hilfsmittel vor jeder Verwendung auf einwandfreien Zustand und ordnungsgemäße Funktion.

Prüfen Sie ggf. vorhandene sperrbare Gelenke bzw. federnde Elemente vor jeder Verwendung auf ordnungsgemäße Funktion der Gelenksperre(n) bzw. der Federelemente.

Beachten Sie beim Anziehen des Hilfsmittels die richtige Reihenfolge und achten Sie auf dessen richtigen Sitz und räumliche Ausrichtung zum Körper.

Achten Sie bei Hilfsmitteln mit zusätzlichen Halte-/ Fixierungsgurten auf richtige Lage und Ausrichtung der Gurte.

Schließen Sie ggf. Verschlüsse in der Ihnen angegebenen Reihenfolge gleichmäßig, aber nicht zu fest.

Prüfen Sie direkt nach dem Anziehen des Hilfsmittels dessen festen und sicheren Sitz.

Vermeiden Sie beim Anziehen des Hilfsmittels Falten und Quetschungen von Haut oder sonstigem Gewebe.

Verwenden Sie das Hilfsmittel nur mit richtigem Zubehör (z.B. Schuhe).

Schützen Sie das Hilfsmittel gegen zu hohe Temperaturen (z.B. Sonne, Heizung), Schlageinwirkung und direkte Wassereinwirkung (z.B. Sauna, Bad, Wassersport).

Nur für ausdrückliche Badehilfsmittel ist direkter Wasserkontakt zulässig.

Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Haut. Achten Sie dabei besonders auf Druckstellen und Hautverfärbungen (Gefahr von Haut- und Gewebeschädigungen).

Führen Sie möglichst täglich die Hautpflege bzw. Hauthygiene und ggf. die Hautmassage durch.

Erstellt: 17.02.2020

17.02.2020

FB:

9.0.0.3

Von: T. Strube

Von:

Von:

Geprüft: 17.02.2020

Inkraftsetzung: 17.02.2020

Freigabe:

Von: I. Ludwig

Von:

Reinigen und pflegen Sie innenliegende, mit Haut in Kontakt kommende Teile des Hilfsmittels regelmäßig mit geeigneten Reinigungsmitteln nach Angabe unserer Mitarbeiter bzw. beachten sie die Reinigungshinweise in der ihnen ausgehändigten Gebrauchsanweisung.

Verwenden Sie keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel!

Lassen Sie das Hilfsmittel regelmäßig über Nacht ablüften. Trocknen Sie das Hilfsmittel bei Durchfeuchtung langsam und nicht auf Heizung bzw. Ofen oder in der Sonne.

Wenn ihre Versorgung Über elektronische Bauteile verfügt befolgen sie bitte unbedingt die Verwendungsanweisungen, die unsere Mitarbeiter ihnen gegeben haben und lesen sich die ihnen ausgehändigte Patienteninformation aufmerksam durch.

Verwenden sie bitte nur die mitgelieferten Akkueinheiten und die dazugehörigen Ladekabel/ Vorrichtungen. Laden sie die Akkueinheiten immer vollständig auf und lassen sie niemals Tiefenentladen.

#### Wichtige Hinweise

Bei Schäden bzw. Fehlfunktionen an ihrem Hilfsmittel verwenden Sie das Hilfsmittel auf keinen Fall ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem zuständigen Techniker!

Bei Schwellungen bzw. Ödembildung wenden Sie sich bitte umgehend an ihren Arzt oder Ihren für Sie zuständigen Techniker.

Führen Sie an dem Hilfsmittel auf keinen Fall Änderungen bzw. Reparaturen in Eigenregie durch!

#### Gewährleistung

Eine Gewährleistung tritt nur in Kraft, wenn das Produkt unter den vorgeschriebenen Bedingungen und zu dem vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt wird. Die Gewährleistung und die Garantie erlöschen, wenn das Produkt anders eingesetzt wird oder mit anderen Bauteilen oder Materialien kombiniert wird. Da uns eine Kontrolle der Einhaltung der Handhabungen und des Umgangs mit den Akkus nicht möglich ist, können wir dahingehend keinerlei Haftung für durch Akkus entstandene Schäden oder Kosten gewähren. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäfts-, Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Erstellt: 17.02.2020

17.02.2020

FB:

9.0.0.3

Von: T. Strube

Von:

Von:

Geprüft: 17.02.2020

Inkraftsetzung: 17.02.2020

Von: I. Ludwig

Von:

Freigabe: